

## mat4pet – Bedienungsanleitung

(Art. 464365)



### Allgemeine Hinweise:

- Elektrische Heizmatte mit 12 V Schutzkleinspannung für Haustiere
- Material: wasser- und verrottungsfestes Material
- Verwendung: Steckernetzteil direkt an das 230V-Stromnetz anschließen
- Temperatur: bei 20°C Umgebungstemperatur ohne Abdeckung max. ca. 38°C
- Aufheizdauer: abhängig vom Untergrund und Umgebungstemperatur

### Sicherheitshinweise:

- Bei narkotisierten/bewegungsunfähigen Tieren **muss** der Thermostat UT300 zur Temperaturregelung verwendet werden → Diesen direkt unter das Tier legen und gegen Verrutschen sichern
- Oberfläche nicht mit wärmedämmenden Stoffen (Styropor, Schaumstoff, Textilien) bedecken → Nur unter Verwendung des Thermostats (Art-Nr.: 467041)
- Matte nicht falten oder knicken um Überhitzung zu vermeiden
- Nicht als Heizkissen, Bettwärmer u.a. verwenden

### 24 Monate Gewährleistung:

Unsere Gewährleistung für Material und Verarbeitung beträgt 24 Monate. Eine Gewährleistung ist jedoch für die Fälle ausgeschlossen, in denen ein Fehlverhalten des Kunden (Nichtbeachtung der Sicherheits- und Anwendungshinweise, falsche Anwendung und Zweckentfremdung, Beschädigung der ThermoLux Wärmematte mat4pet) für die Schäden wegen Überhitzung oder durch einen elektrischen Schlag ursächlich geworden ist.