

# mat4pet

Maximale Oberflächentemperatur: 38° Celsius

**Jedoch abhängig von:**

- Tatsächliche Leistung des Heizelements (Toleranz  $\pm 10\%$ )
- Größe des zu beheizenden Objekts
- Wärmeleitwert zwischen Matte und Objekt
- Heizdauer
- Umgebungstemperatur



Die Matte ist vor Beschädigung zu schützen, sie darf nicht geknickt/gefaltet werden!

Wird die Matte abgedeckt **muss** ein Temperaturregler verwendet werden! Dieser muss bei spätestens +55°C den Stromkreis zuverlässig unterbrechen.

**Empfehlung für Tierarztpraxen:**

NUR zusammen mit Temperaturregler UT300 kaufen, auch im Set erhältlich (Art-Nr.: 464465).

Für narkotisierte oder bewegungsunfähige Tiere **muss** der Thermostat verwendet werden.

Temperaturfühler direkt unter das Tier legen und gegen Verrutschen sichern.

Operateur muss die Temperatur verbindlich einstellen und überprüfen.